

CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS

Código	SGQ-REC 001
Edição	3.0
Data	01/06/2017
Página	1 de 3

A qualidade dos resultados dos exames laboratoriais está intimamente relacionada à fase pré-analítica, que se inicia desde o preenchimento correto da requisição, preparação do paciente, coleta e identificação da amostra, armazenamento temporário da amostra no local de coleta, transporte ao laboratório, até o recebimento e cadastramento das amostras no IPCM.

Esta fase deve ser criteriosamente definida e constantemente monitorada em razão do impacto significativo das atividades realizadas durante este processo sobre a qualidade do resultado liberado.

Toda amostra biológica deve ser encaminhada ao laboratório acompanhada da requisição para exames do IPCM devidamente preenchida.

Todos os recipientes com amostras (sacos plásticos, vidros, vasilhames plásticos ou tubetes) deverão conter identificação mínima com pelo menos o nome do paciente, data do procedimento, identificação da peça (biópsia gástrica, histerectomia, cone de colo uterino, PAAF de tireoide...etc).

No transporte de amostras biológicas deve-se obedecer rigorosamente às normas de biossegurança vigentes no país e conforme descrito no manual de acondicionamento e transporte.

CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS	Código	SGQ-REC 001
	Edição	3.0
	Data	01/06/2017
	Página	2 de 3

A seguir os critérios que serão avaliados no ato do recebimento do material:

DID	Divergência na identificação do paciente	Crítico
FOR	Vazamento de formol	Importante
IDE	Sem identificação nas lâminas ou frascos	Crítico
IHQ	Pedido de Imuno-histoquímica sem laudo	Crítico
IMT	Identificação quanto a topografia do material	Importante
LAM	Lâminas quebradas	Crítico
NOM	Não coincidência do prontuário/paciente	Crítico
QTD	Nos aspectos quantitativos: número de lâminas e ou fragmentos, suficiência do material	Importante
RTE	Requisições e ou Termo de Esclarecimento para Transporte faltando ou não preenchidos corretamente	Crítico
LIS	Listagem de pacientes	Importante
FIX	Sem fixador ou fixador inadequado	Importante
NUM	Número de frascos divergentes com a requisição	Crítico
PIC	Preenchimento incorreto ou o não preenchimento dos itens: proveniência, natureza, dados clínicos e tipo do exame solicitado	Importante
FRA	Frasco quebrado	Crítico

As amostras que não atenderem a qualquer requisito crítico serão rejeitadas e inseridas na planilha de não conformidade com as anotações necessárias a cada caso e não serão cadastradas, sendo informado ao serviço de origem através de e-mail a divergência constatada.

CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS

Código	SGQ-REC 001
Edição	3.0
Data	01/06/2017
Página	3 de 3

O prazo para correção do problema será de 3 (três) dias úteis contados a partir de sua notificação. Excedido este prazo a amostra será devolvida com o apontamento das divergências (termo de não conformidade).